

Mode d'emploi de SANZA



État 2.8.07

Table des matières

➤ Préface	3
➤ Indications générales sur l'installation de Senza.....	4-5
➤ Installation de l'unité de commande, mise en service et branchement électrique des applicateurs	6
➤ Mise en marche de l'unité de commande Senza	6
➤ Applications « QUICKSTART »	7-8
➤ Application « MANUELLE »	9-11
➤ Enregistrer un programme « PERSONNEL » spécifique à l'utilisateur	12-15
➤ Choisir un utilisateur programmé.....	16-17
➤ Réglages et messages d'erreur	18
➤ Bio-contrôle	19
➤ Jeu d'électrodes Zapper.....	19
➤ Bâton sans laser.....	19
➤ Bâton avec fonction laser	19
➤ Applicateur Helmholtz	20
➤ Complément de Senza – unité de commande avec batterie	20
➤ Stockage, nettoyage, contrôle, réparation, élimination	20-21
➤ Données techniques, ampleur de la livraison	22-23
➤ Ampleur de la livraison, explication des signes, responsabilité et garantie, fabricant	24
➤ Déclaration de conformité.....	25
➤ Informations sur le produit.....	26

Chère cliente de Santerra, cher client de Santerra,

félicitation d'avoir décidé de prendre en main vous-même votre prévention en terme de santé !

Les personnes qui conservent la santé ont une meilleure qualité de vie. L'augmentation des capacités de régénération physiques et mentales engendre une fragilité moins forte par rapport aux maladies engendrées par la vie moderne, une condition physique soutenue et un bien-être plus intense d'une manière générale.

SANZA travaille pour votre santé selon les principes de la nature. L'effet de résonance du champ magnétique circulant sur les cellules corporelles stimule leurs mécanismes naturels de génération. Le métabolisme est stimulé, les fonctions corporelles peuvent être ajustées et harmonisées. La thérapie combinée avec le bâton à laser et les fréquences Zapper vous propose à vous-même et à votre famille une utilisation supplémentaire.

Lors du développement de SANZA, la facilité d'utilisation et la sécurité eurent la première place. Des médecins et des biologistes ont étudié les mécanismes d'action des possibilités d'utilisation de SANZA. La mise en pratique technique des résultats a été transformée en une fabrication allemande soignée. Les principes d'action transformés à l'aide des techniques les plus modernes vous permettent une utilisation de haute qualité tout en restant commode, et ceci 24 heures sur 24 et pratiquement dans tous les domaines personnels de votre vie. Que vous l'utilisiez comme système de régénération pour toute la famille ou lors de vos activités sportives : l'utilisation régulière de SANZA aide à mieux équilibrer votre corps par rapport aux fardeaux de la vie de tous les jours. Faites votre expérience personnelle ! Votre expert se réjouit de vous aider – avec notre ligne directe MEDHOTLINE – pour toute question portant sur l'utilisation.

Le fabricant et le partenaire de distribution

vous souhaitent

bonne chance, une bonne santé, une qualité de vie et du bien-être avec SANZA.

*Pour votre propre sécurité, veuillez prêter attention au fait que :
les indications faites dans ce mode d'emploi doivent absolument être suivies ! C'est
pourquoi nous vous prions de lire ce mode d'emploi attentivement et dans sa totalité avant
la première mise en service !*

Contre-indications :

Stimulateur cardiaque ou implants électroniques

Épilepsie

Grossesse

Fièvre aiguë (plus de 39°C)

Indications générales concernant votre système SANZA

❖ Qu'est-ce que SANZA ?

Sanza est basé sur les mécanismes de guérison de la nature. Le système utilise des champs magnétiques de basse fréquence afin d'accélérer le métabolisme des cellules. Les électrodes Zapper optionnelles vous permettent de faire une cure de 4 à 6 semaines au moins 2 fois par an avec une bande modèle de fréquences luttant contre les virus, les bactéries, les mycoses et les parasites se trouvant dans votre corps.

❖ Quels sont les effets de Sanza sur votre organisme ?

Sanza favorise l'absorption de l'oxygène par votre sang ainsi que sa fluidité, renforce l'ossature, active le métabolisme et vitalise le système immunitaire. Vous vous sentez en pleine forme, bien dans votre peau et en pleine santé, vraiment SANZA. Grâce aux champs magnétiques circulant, les mécanismes de réparation de votre corps sont activés et le corps est mieux armé pour lutter contre les attaques dues à l'environnement, au stress et à l'agitation.

❖ Comment fonctionne SANZA ?

Le cœur du système SANZA est un générateur de champs magnétiques commandé par un microprocesseur. Il transmet des fréquences correspondant aux cycles de régénération naturels du corps sur le tapis, le coussin, le bâton etc. d'application. Un champ magnétique circulant à basse fréquence se crée alors.

❖ À quoi devez-vous prendre garde ?

L'utilisation de SANZA ne remplace aucun diagnostic et aucune thérapie de médecine traditionnelle. C'est pourquoi vous devez en tous les cas suivre les indications de votre médecin, les instructions de votre conseiller ou les recommandations de la MEDHOTLINE que votre conseiller vous propose.

❖ SANZA peut être utilisé pour :

Améliorer le bien-être général grâce à ses effets harmonisant et en vitalisant sur le corps.

Améliorer les fonctions de régénération et de défense.

❖ SANZA ne doit pas être utilisé en cas de :

- Stimulateur cardiaque et autres implants électroniques
- Épilepsie
- Grossesse (pour des raisons éthiques, car aucun essai n'a été fait sur des enfants à naître)

- Fièvre aiguë (plus de 39°C)
- Des infections mycosiques ou bactériennes aiguës et importantes (hôpital)
- Une arythmie cardiaque et une insuffisance cardiaque graves (degré III et degré IV)
- Hyperthyroïdie (si elle n'est pas traitée par médicament)

❖ **Utilisation de SANZA :**

En dehors du réglage pouvant être choisi totalement manuellement, SANZA dispose de PROGRAMMES STANDARDS qui ont été développés sur des valeurs empiriques médicales. Après entente avec votre médecin ou votre thérapeute ou encore avec la MEDHOTLINE, votre conseiller vous conseille des réglages spécifiques à votre état de santé.

Veillez prendre garde à enlever les objets sensibles au niveau magnétique avant chaque utilisation tels que : les cartes magnétiques, les montres électriques, les prothèses auditives etc. ! L'appareil ne doit pas être utilisé dans les blocs opératoires !

Indication :

Afin d'éviter l'éventuelle transmission d'agents pathogènes par le contact physique, vous êtes prié de vous allonger exclusivement habillé sur votre tapis SANZA ou sur votre coussin SANZA. Le succès de l'utilisation n'en sera en aucun cas diminué.

❖ Erreurs d'utilisation possibles de SANZA

Veillez prendre garde, lors de l'utilisation de l'appareil, à ne toucher l'écran tactile qu'aux endroits où chacune des touches de fonction à presser est représentée. Au cas où vous toucheriez l'écran par erreur, par exemple en touchant le cadre en tenant l'appareil, la fonction tactile peut alors être irritée. Il en est de même pour l'écran tactile lorsqu'il est très sale. Dans ce cas, nous vous prions de nettoyer l'écran à l'aide d'un chiffon en microfibre ou d'un chiffon à lunettes.

❖ Température de service de SANZA

Veillez à ce que la température ambiante de service se situe entre 0°C et + 35°C.

Indication :

L'unité de commande, le transformateur et les applicateurs doivent être protégés contre toute pollution, secousses, détérioration mécanique ou contre toute humidité extrêmes.

- ❖ **Installation de votre unité de commande SANZA**, mise en service électrique et branchement des applicateurs. Relier la fiche du transformateur à la prise de courant électrique et à l'unité de commande (prendre garde à la direction d'insertion).



Branchement pour la fiche du

1 DEL pour chargement de batterie
1 DEL en réserve
Branchements pour bâton et Rio-contrôleur

Vous démarrez votre système Sanza grâce à une légère pression du doigt sur le bouton vert



Coussin d'application

Fiche de raccord pour les électrodes Zapper

Électrodes Zapper


4 possibilités de branchement pour applicateurs (tapis, coussin d'application, application vétérinaire)

Démarrer une application Quickstart :

La salutation demeure env. 5 sec. et passe ensuite automatiquement à l'image suivante




Programmes Quickstart :

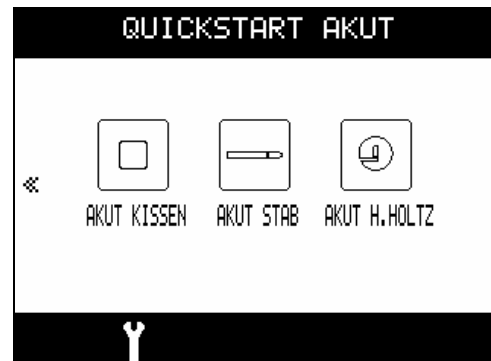

Les programmes Quickstart sont utilisés selon les différents moments de la journée :
 VITALE le matin,
 RELAX l'après-midi,
 SOMMEIL avant d'aller dormir et
 SPORT avant tout effort physique ou mental.

Vous parvenez aux programmes QUICKSTART ACTUELL pour le coussin et le bâton d'application et pour l'application Helmholtz grâce à la double flèche. Si vous pressez ce bouton, ceci déclenche une application de programmes établis. (Paramètres ne pouvant pas être changés)

Paramètre bandes de fréquence	vitale	relax	sommeil	sport	coussin actuell	bâton actuell	H-holtz actuell
Durée de traitement en min.	8	16	8	16	16	16	16
Générateur de signal MF en Hz	20	8	4	20	25	25	25
Générateur d'impulsion MF en Hz	200	200	200	200	200	200	200
Amplitude MF en μ T	40	40	20	80	150	300	1250
Forme de signal	séquence	sinus	sinus	séquence	rectangle	rectangle	rectangle
Polarité MF	Bi	Bi	Bi	Bi	Bi	Bi	Bi

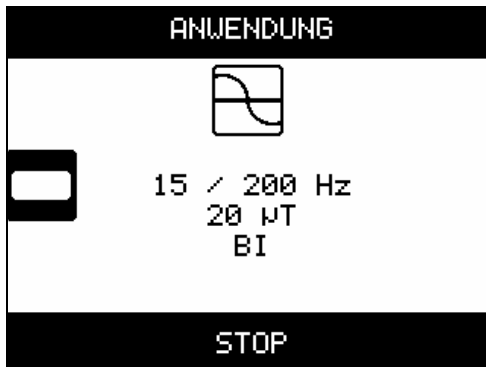


Après avoir démarré, le paramètre choisi est affiché. L'affichage du temps avance à une cadence de 5 sec.


Choisir un réglage manuel :



Vers la page suivante

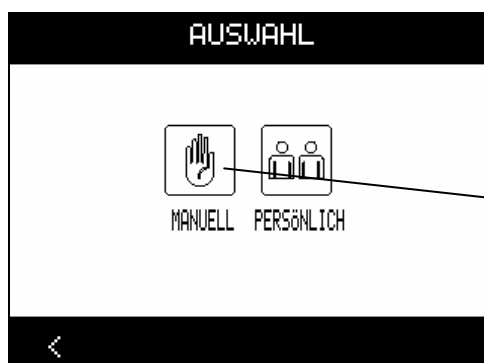


Presser réglage manuel

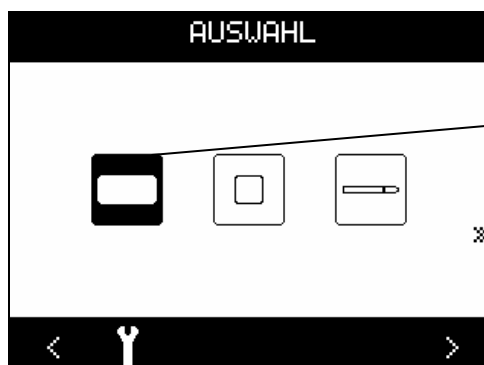

Choisir un applicateur.
L'applicateur choisi est marqué.
Vous parvenez à des applicateurs supplémentaires en double-cliquant.



Vers la page suivante

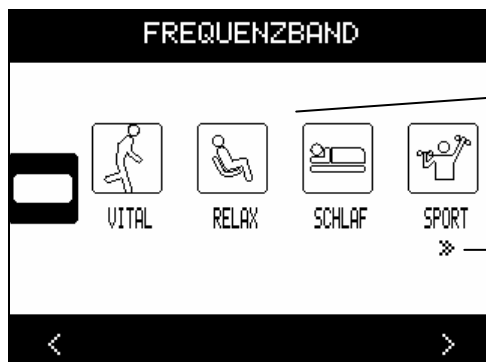


Choisir des bandes de fréquences préconfigurées. Le champ choisi

Vous parvenez à une programmation pour professionnels en double-cliquant et vous pouvez choisir signal, fréquence, durée, intensité et polarité ainsi que pulsation

Vous pouvez choisir entre :

- a. choisir une bande de fréquences ou
- b. vous engager dans une programmation pour professionnels à l'aide de la double flèche.

- a. Choisir une bande de fréquence, le champ choisi est marqué
Feuilleter à la page suivante (à l'aide de la flèche à droite en-bas dans le guidage de l'utilisateur)

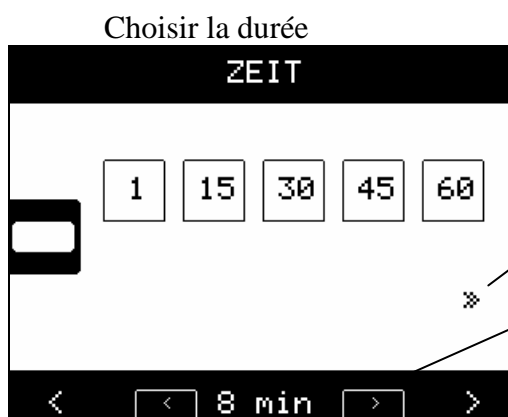


Vous parvenez à l'affichage du mode à l'aide de la double flèche et vous pouvez choisir polarité et pulsation (1=1 minute de signaux et 1 minute de pause, 2= 2 minutes de signaux et 2 minutes de pause jusqu'à ce que le temps réglé soit écoulé


Vous pouvez faire avancer les minutes à l'aide des flèches situées à la gauche et à la droite de l'affichage de la durée

Vers la page suivante

Choisir l'intensité à l'aide des différents niveaux

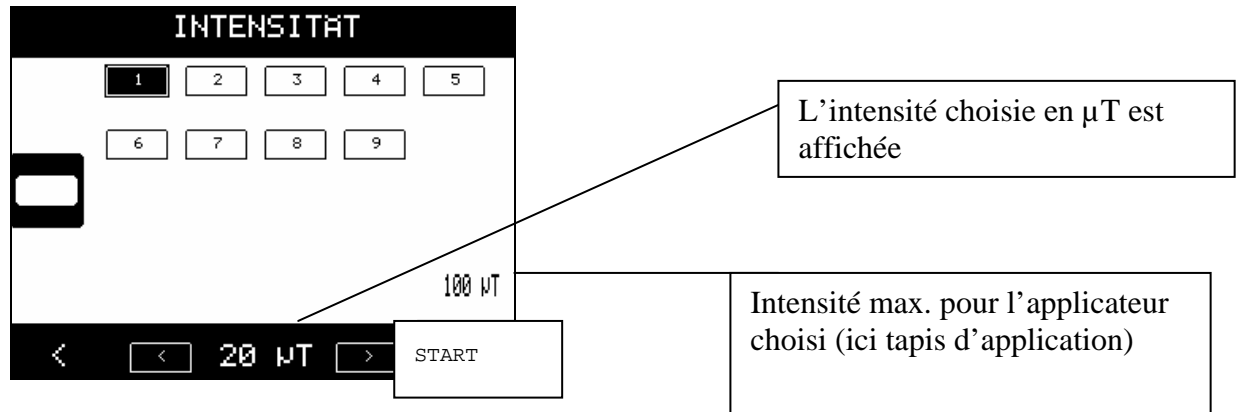


Appuyer sur le bouton départ

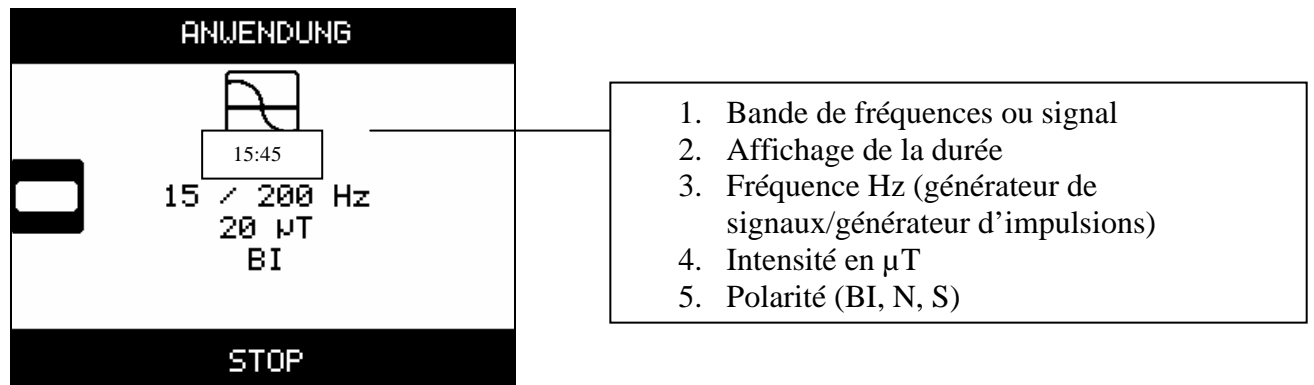


Programmation personnelle




vers la page suivante

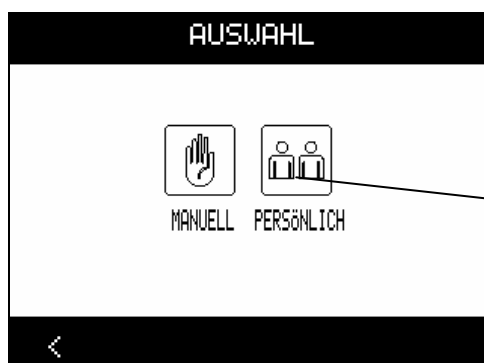

Presser réglage personnel

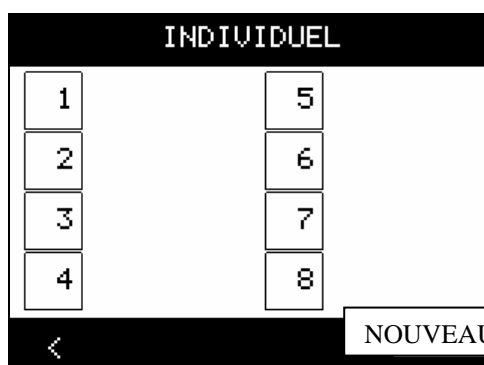


Appuyer sur
« NOUVEAU » pour entrer

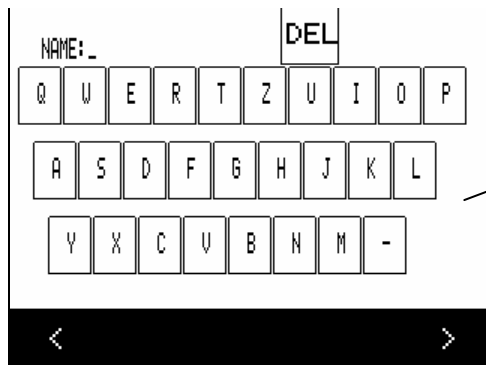

Entrer le nom


Confirmer à l'aide de la flèche

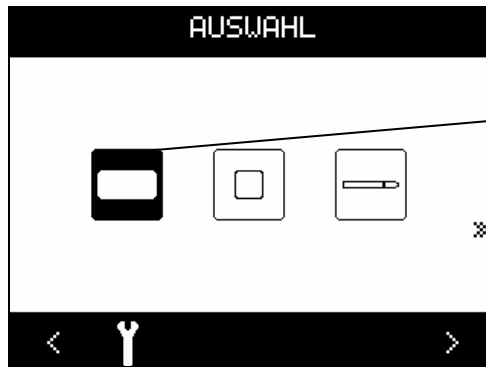

Choisir un applicateur. L'applicateur choisi est marqué. Vous parvenez à des applicateurs supplémentaires en double-cliquant.



vers la page suivante

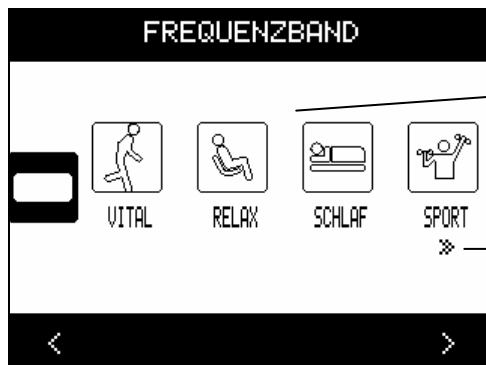

Choisir les bandes de fréquences préconfigurées. Le champ choisi

Ou vous parvenez à la programmation pour professionnels en double-cliquant (vous pouvez choisir signal, fréquence, durée, intensité et polarité ainsi que pulsation)

Vous pouvez désormais choisir entre :

- a. choisir une bande de fréquences ou
- b. **vous engager dans la programmation pour professionnels à l'aide de la double flèche.**

Exemple d'une programmation pour professionnels :


The image displays three sequential screenshots of a signal generator's menu system, with callouts explaining the navigation and options.

Screenshot 1: SIGNAL
This screen shows the signal type selection menu. The title is "SIGNAL". Below the title are five icons representing different signal waveforms: a square wave, a sine wave, a sawtooth wave, an inverted sawtooth wave, and a rectangular pulse. Below each icon is its corresponding label: "SINUS", "S-ZAHN", "iS-ZAHN", and "IMPULS". A left-pointing arrow is on the far left, and a right-pointing arrow is on the far right.
Callout: Choisir la forme de signal
Sinus
Dent de scie
Dent de scie inversée
Rectangulaire

Screenshot 2: SIGNALGENERATOR
This screen shows the frequency selection menu. The title is "SIGNALGENERATOR". Below the title are five buttons labeled "OFF", "15", "30", "45", and "60". The "15" button is highlighted. A right-pointing arrow is on the far right. Below the buttons, the text "15 Hz" is displayed, with left and right arrows on either side.
Callout: Continuer vers le générateur
Les flèches à gauche et à droite de l'affichage Hz signifient 1 Hz vers le

Screenshot 3: IMPULSGENERATOR
This screen shows the pulse width selection menu. The title is "IMPULSGENERATOR". Below the title are two rows of buttons. The first row contains "OFF", "150", "200", "250", and "300". The "200" button is highlighted. The second row contains "400", "1000", "2500", and "5000". A left-pointing arrow is on the far left. Below the buttons, the text "200 Hz" is displayed, with left and right arrows on either side.
Callout: Ce second générateur remplit le signal choisi dans le 1er générateur avec des impulsions rectangulaires

Choisir la durée

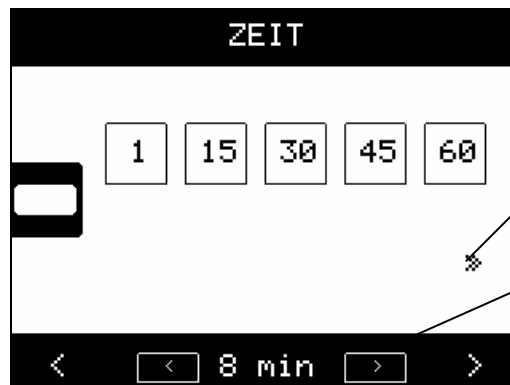


Vous parvenez à l'affichage du mode à l'aide de la double flèche et vous pouvez choisir polarité et pulsation (1=1 minute de signaux et 1 minute de pause, 2= 2 minutes de signaux et 2 minutes de pause jusqu'à ce que le temps réglé se soit écoulé)

Vous pouvez faire avancer ou reculer les minutes à l'aide des flèches à gauche et à droite de l'affichage de la durée

vers la page suivante

Choisir l'intensité en utilisant les différents niveaux


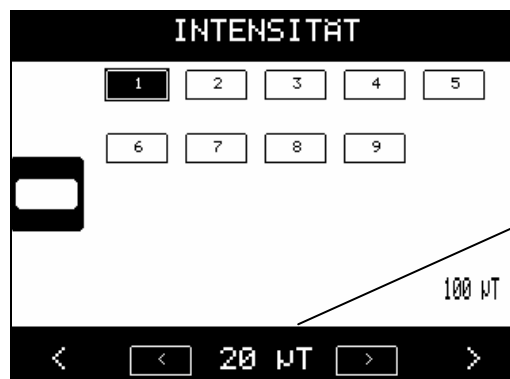


L'intensité choisie en μT est affichée

Intensité maximale pour l'applicateur choisi (ici tapis d'application)

vers la page


Choisir des applicateurs supplémentaires sous « personnel » et mettre au point les paramètres. Lorsque tous les applicateurs sont programmés, choisissez « FINI »

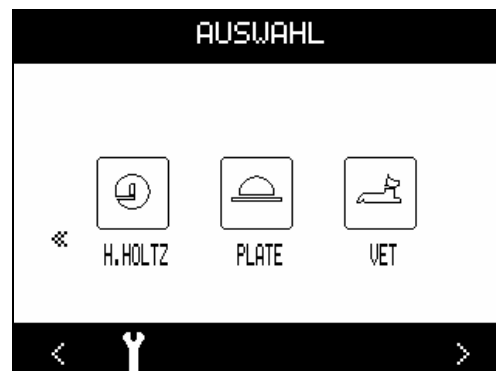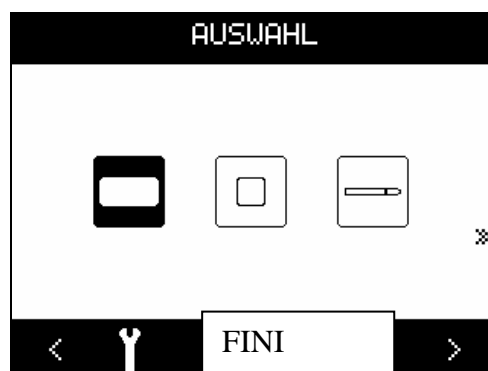


Choisir un utilisateur programmé :



Vers la page suivante

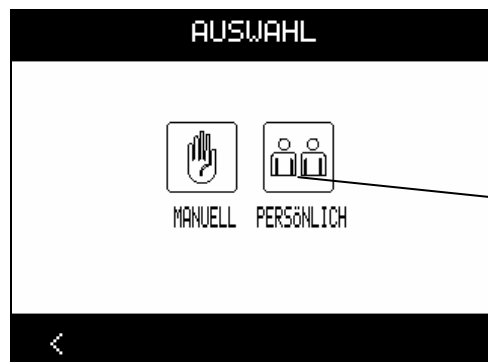



Presser réglage personnel

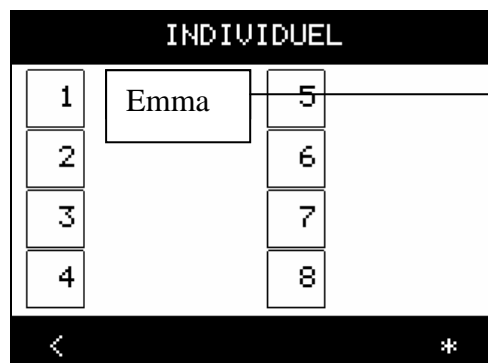

Choisir un nom


Choisir un applicateur (seuls les applicateurs qui ont été inscrit pour un programme apparaissent) et DÉMARRER.

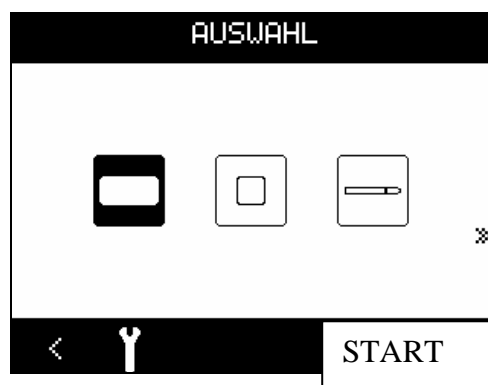

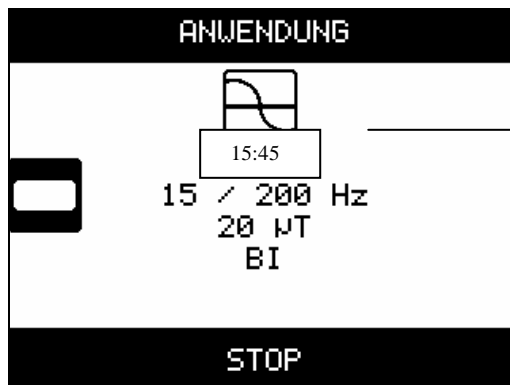


1. Bande de fréquences ou signal
2. Affichage de la durée
3. Fréquence Hz (générateur de signaux/générateur d'impulsions)
4. Intensité en μ T
5. Polarité (BI, N, S)

Réglages concernant la clé :

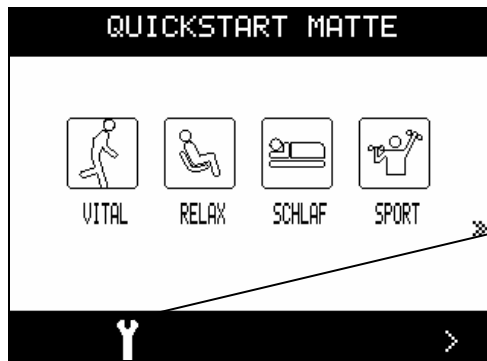

Vous parvenez à la configuration grâce à la clé

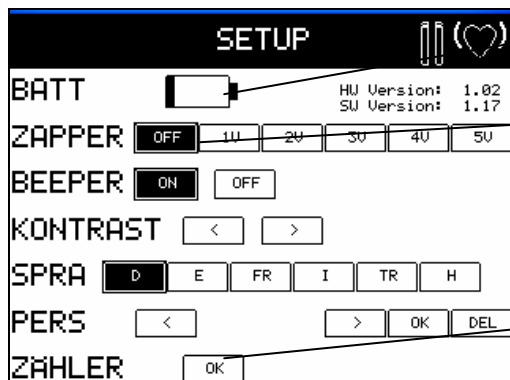


Indication de l'état de la batterie/pile

Réglage Zapper on/off et à des niveaux différents de 1 volt

Quitter grâce à ok

1. Vous pouvez vérifier l'état de chargement de la batterie dans la configuration,
2. activer la fonction Zapper
3. allumer ou éteindre la tonalité bip
4. changer le contraste
5. régler la langue de gestion du menu
6. changer et effacer le programme personnel et
7. rechercher les statistiques d'utilisation sur les différents applicateurs
8. quitter à l'aide de Compteur ok dans le masque des statistiques et continuer à partir de là grâce à la flèche en-bas à droite.

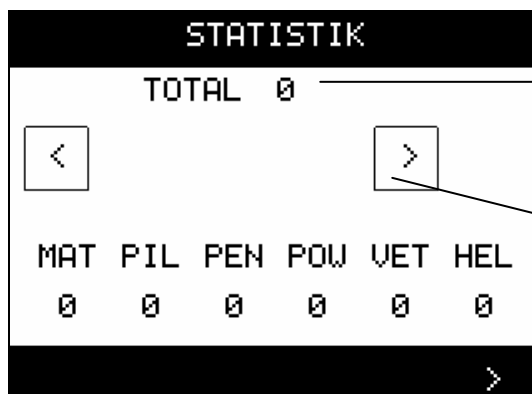

Quantité totale des applications sur le système

Feuilleter vers l'avant les programmes personnels

Quitter la page

Autres affichages et message d'erreur :

SANS APPLICATEUR un applicateur – aucun applicateur n'est branché

APPLICATEUR RUPTURE DE CÂBLE – la construction à bobine comporte une rupture de câble

Bio-contrôleur



Les informations concernant la variabilité du rythme cardiaque ((HRV) Herzratenvariabilität) sont dirigées à l'unité de commande par une pince à oreille et ajustent vos réglages. Brancher la fiche à 25 pôles à droite de l'unité de commande

- a. Mettre la pince à oreille
- b. Allongez-vous sur l'applicateur corps entier
- c. La première mesure est effectuée après une minute (vous êtes prié de rester allongé et de ne pas bouger) – les données sont indiquées sur l'affichage
- d. La deuxième mesure a lieu 4 minutes plus tard
- e. Au cas où l'intensité serait trop forte, votre feedback règle alors celle-ci en descendant de deux niveaux – indication faite sur l'affichage
Les réglages sont ajustés automatiquement, il n'est pas nécessaire de redémarrer !
- f. Si le réglage choisi est bon – l'indication en est faite sur l'affichage

Jeu d'électrodes Zapper



Une bande de bio-fréquences est appliquée au corps par le biais d'un accès et grâce à 2 électrodes Zapper (+/-). Les électrodes Zapper doivent être prises dans les deux mains et utilisées diagonalement, par ex. : la main droite et le pied gauche ou l'inverse. Grâce au zapper, vous expérimentez le sentiment bienfaisant qui résulte de la hausse de l'énergie corporelle. Parallèlement, les informations négatives sont éliminées grâce à des vibrations des molécules et un ajustage des structures moléculaires est ainsi obtenu. Votre vitalité est favorisée et votre système immunitaire est renforcé. La durée nécessaire d'une application normale est d'env. 8 minutes et peut être utilisée parallèlement au champ magnétique. Il est conseillé de faire des cures de 2 à 4 semaines plusieurs fois par an. Attention : les électrodes Zapper ne doivent pas être appliquées dans la région de la poitrine, car ceci augmenterait le risque de fibrillations ventriculaires. L'utilisation dans la proximité d'appareils thérapeutiques à ondes courtes ou à micro-ondes peut provoquer des variations dans les valeurs de base de l'appareil électrique. La fonction Zapper peut être équipée ultérieurement, mais l'unité de commande doit alors être renvoyée afin que le logiciel puisse être mis à niveau. Les réglages des Zappers sont effectués par la clé et peuvent être réglés de 1 à 5 volts à des niveaux de 1 volt de différence.



Bâton avec légère fonction laser

Le bâton d'application est employé pour les utilisations ponctuelles. Le branchement du bâton d'application s'effectue sur la prise femelle à 9 pôles à droite. Les douleurs pouvant être indiquées du doigt sont le domaine d'application idéal. Nettoyage avec des produits

désinfectants habituels (Lysoform, Bacillol, etc.). 2 lampes DEL jaunes indiquent si le champ magnétique est créé ou non et si le laser (à la pointe du bâton) fonctionne également (le laser peut être allumé ou éteint grâce au point de contact vert). Le laser a une puissance de pointe de laser de 5mW et une longueur d'onde de 658 nm.

La légère fonction laser supplémentaire à la pointe du bâton permet de traiter de petites plaies ouvertes dans un but anti-inflammatoire, d'effectuer de l'acupuncture sans utiliser d'aiguille et en pénétrant profondément ainsi que de calmer des points douloureux. **Attention, ne pas éclairer dans les yeux avec le laser !**



applicateur Helmholtz

Applicateur intense à utiliser lors de fractures, de signes d'usure sur de petites ou de grandes articulations et dans le domaine des mâchoires et des dents. L'applicateur peut assumer des intensités aussi fortes que 10 mT (10.000 μ T) !

Unité de commande Sanza avec batterie

Afin de pouvoir activer le réseau du système Sanza indépendamment, l'utilisation d'une batterie est proposée. La durée de chargement est de ~2,5 heures. L'opération de chargement est mise en marche aussitôt que l'unité de commande est branchée au courant électrique sans être utilisée. Les cellules de batterie durent env. 12 à 24 mois selon leur utilisation. La batterie ne peut pas être équipée ultérieurement, il faut pour cela renvoyer l'unité de commande. L'état du chargement peut être recherché sur l'affichage « clé » sous « état du chargement ». Seul le fabricant peut changer l'ensemble de la batterie. **INFORMATIONS IMPORTANTES** : dans l'utilisation de la batterie, la densité de fluidité du coussin d'application est limitée à 150 μ T et celle de l'applicateur Helmholtz à 1 250 μ T. Si un générateur de signaux est mis sur OFF, une densité de fluidité maximale de 4 000 μ T est possible sur batterie.

Stockage, nettoyage, contrôle, réparation, élimination

Stockage :

L'unité de commande, le transformateur et les applicateurs doivent par principe être protégés contre toute pollution, secousse (chute), détérioration mécanique ou contre toute humidité extrêmes. Les raccords de câbles doivent être roulés de manière lâche et ajoutés aux applicateurs et ne doivent pas être enroulés autour de l'applicateur. Ne pas tirer sur la fiche de l'unité de commande mais la tenir au niveau de la fiche et la retirer. Température pour le stockage : -10°C à +50°C. La température ambiante pendant l'utilisation doit se situer entre 0°C et 35°C.

Nettoyage :

Unité de commande : essuyer seulement à l'aide d'un chiffon microfibre, ne pas utiliser de produit d'entretien contenant de l'alcool ! Le liquide ne doit pas couler dans l'unité de commande.

Essuyer le bâton à l'aide d'un chiffon humide et d'un produit désinfectant, ne pas faire pénétrer de liquide dans les ouvertures !

Tapis et coussin : commander un produit d'entretien auprès du distributeur ou nettoyer à l'aide de produit lessive et d'un chiffon microfibre humide.

Contrôle :

Le système contrôle avant chaque départ la capacité de fonctionnement des applicateurs et indique les ruptures de câbles par le biais de l'affichage.

Contrôle se répétant

La législation stipule un contrôle de tous les 2 ans pour les appareils médicaux. Ce contrôle concerne en premier lieu les utilisateurs des appareils proposant des services commerciaux. L'objectif du contrôle est de garantir la fiabilité du fonctionnement. Ces contrôles peuvent être effectués par le fabricant. Veuillez vous adresser à votre conseiller à ce propos.

Étendue du contrôle :

1. Contrôler le boîtier de l'unité de commande ainsi que le transformateur par rapport à tout endommagement.
2. Contrôler tous les câbles par rapport à tout endommagement.
3. Mesures du courant de fuite de l'unité de commande et des applicateurs
4. En cas de soupçon d'endommagement à l'intérieur : contrôle visuel à l'intérieur
5. Contrôle des fonctions
6. Contrôler l'utilisation du transformateur spécifique

Ces contrôles peuvent être effectués par le fabricant et/ou par un institut de contrôle accrédité.

Réparation

Les réparations et les services doivent être effectués exclusivement par le fabricant. Indication : le fabricant ne se sent responsable de la sécurité de l'appareil que si les réparations sont effectuées par les personnes autorisées à le faire, si l'installation électrique de la pièce en question répond aux exigences correspondantes et si l'appareil est utilisé selon les indications stipulées dans le mode d'emploi.

Élimination :

L'unité de commande, les parties de l'unité de commande ainsi que les accessoires ne présentent aucun danger particulier. Les versions à batterie des unités de commande contiennent des piles en lithium qui doivent être éliminées selon les directives d'élimination légales dans le pays, et les frais d'éliminations sont à la charge du fabricant. L'ensemble de la batterie peut être déposé auprès des services de dépôt connus sur place. L'élimination des unités de commande défectueuses doit être effectuée selon les lois nationales d'élimination de déchets électroniques. CECI N'EST PAS UN DÉCHET MÉNAGER !



Distribution :

Firme Santerra Handels-GmbH

Dir. : Petra Pichler

Ahornstrasse 30

D-83451 Piding.

Le numéro d'élimination EAR (Elektro-Altgeräte Register, registre d'anciens appareils électroniques) est : WEEE DE 85903359

Données techniques

Unité de commande

SANZA :

Genre : No. d'art. SANZA2499
Système à champ magnétique

Type d'appareil : multifonctionnel

Tension nominale : 18 V DC

Courant nominal : 1,1 A

Type de construction : appareil portatif

Classe de protection : II

Degré de protection : BF

Poids : 1,26 kg

Mesures extérieures : 260x210x45 mm

température de service : 0°C à +35°C

Température de stockage : -10°C à +50°C

Cycle de fonctionnement : fonctionnement permanent

Tapis d'application

SANZA

Genre : No. d'art. SANZA450M

Bobines : 1 bobine (50 enroulements) en mousse

revêtement : cuir artificiel antimycosique, résistant à l'eau

Longueur de câble : 2,3 m

Amplitude max. du champ alternatif : 100 µT

Point de mesure : au centre de la bobine

Instrument de mesure : détecteur magnétique genre :

Taille : 180x65x2,5 cm

Poids : 3,47 kg

peut être plié deux fois aux emplacements pliés ou enroulé

Coussin d'application

SANZA

Genre : No. d'art. SANZA300K

Bobines : 1 bobine (30 enroulements) en mousse

revêtement : cuir artificiel antimycosique, résistant à l'eau

Longueur de câble : 2,3 m

Amplitude max. de champ alternatif : 300 µT

Point de mesure : au centre de la bobine

Instrument de mesure : détecteur magnétique genre :

Taille : 57x30x2,5 cm

Poids : 0,65 kg

peut être plié et enroulé

Bâton d'application

SANZA

Genre : No. d'art. SANZA350S

Bobines : 1 bobine sur le corps de la bobine
Matériel plastique
Longueur de câble : 2,3 m
Amplitude max. du champ magnétique 1250 μ T
Point de mesure : pointe
Instrument de mesure :

Bâton d'application SANZA à fonction laser

Genre : No. d'art. SANZA690SL
Bobines : 1 bobine sur le corps de la bobine
Matériel plastique
Longueur de câble : 2,3 m
Amplitude max. du champ magnétique 1,25 mT
Point de mesure : à la pointe
Instrument de mesure :
puissance de la valeur nominale : 5mW
Longueur d'onde du laser : 658 nm

Applicateur SANZA bobines Helmholtz

Genre : No. d'art. SANZA690H
Bobines : 2 bobines plates
Matériel :
Amplitude max. du champ magnétique 10 mT
Point de mesure : entre les bobines
Instrument de mesure :

Bio-contrôleur

Genre : No. d'art. SANZA250BC

Électrodes Zapper

Genre : No. d'art. SANZA180Z

Fiche du transformateur No. d'art. NETZTEIL70

Ampleur de la livraison

Le système est livré dans l'équipement de base avec la fiche du transformateur no. d'art.. NETZTEIL70 l'unité de commande no. d'art. SANZA2499 l'applicateur corps entier no. d'art. SANZA450M et le coussin d'application no. d'art. SANZA300K.

Les accessoires supplémentaires tels que

Les électrodes Zapper no. d'art. SANZA180Z
le bio-contrôleur no. d'art. SANZA250BC
les bobines Helmholtz no. d'art. SANZA690H ainsi que
le bâton sans fonction laser no. d'art. SANZA350S et

le bâton avec fonction laser no. d'art. SANZA690SL
peuvent être obtenus séparément.

Seuls les accessoires adaptés livrés par le fabricant peuvent être utilisés !

Responsabilité et garantie

La garantie est le droit ancré dans la loi du client du cédant à exiger une garantie pour toute imperfection à l'objet. La marchandise doit « correspondre au contrat », sinon, elle sera déficiente. Mais le cédant ne doit assumer que les imperfections qui existaient déjà avant la remise de la marchandise. Pour la prise en charge des imperfections qui apparaissent après la remise, « la supposition irréfutable que l'objet était déjà défectueux au moment de la remise de la marchandise » fait autorité. Le cédant est à la charge des preuves que les imperfections n'étaient pas encore présentes lors de la remise de la marchandise pendant les six premiers mois suivant cette remise. Le cédant est en premier lieu obligé d'améliorer ou d'échanger les imperfections dans un délai raisonnable afin de rétablir les qualités présumées. S'il n'y parvient pas, l'acquéreur peut en conséquence faire valoir une réduction ou un changement du prix (tel que la résiliation du contrat accompagnée du remboursement de la somme payée, renvoi de la marchandise). Il est possible de faire valoir ces droits dans le délai de 24 mois (période de garantie), et la charge des preuves incombe au cédant après 6 mois (charge inversée).

Aucune garantie n'est assumée pour tout endommagement issu de manipulations incorrectes, de destructions intentionnelles et d'usure. La garantie du cédant pour la défectuosité de l'objet ne peut pas être limitée par contrat vis-à-vis de l'acheteur. (Par ex. : conditions générales de vente). Le droit de garantie comprend également les droits à des dommages-intérêts pour tout dommage dû à des imperfections ou à des conséquences d'imperfections. La garantie est une promesse faite par contrat par le fabricant pour les imperfections pouvant advenir sur un objet pendant la période de garantie. La période de garantie indiquée dans l'explication de garantie (certificat de garantie) fait autorité pour ce qui est de la période de droit. Les services issus de la garantie ne doivent pas tous être obligatoirement gratuits. –Mais ceci est expliqué de manière détaillée dans le règlement des garanties. La garantie revient à l'acquéreur en supplément des droits de garantie et ne les remplace pas, mais elle engage le fabricant.

Délai de garantie : 24 mois à partir de la livraison.

Le droit allemand fait expressément autorité. Tribunal compétent : Laufen.

Explication des signes.



Type de protection : BF



Classe de protection II



Observer le mode d'emploi

Informations sur le produit

Distribution exclusive :



Maison productrice :

STA-GmbH
Kleßheimer Allee 13, 5020 Salzburg

Santerra Handels GmbH
Ahornstrasse 30, 83451 Piding
Tél : 08651-714803 Fax : 714807
www.santerra.net

Date d'emballage

Genre de produit :

Appareil à champ magnétique multifonctionnel, classe de produit II

Selon l'attestation de conformité CE0636, EN 60601 et la directive de produits médicaux :
93/42/EWG

Désignation :

Unité de commande SANZA

Numéro de fabrication : _____

Tapis d'application SANZA

Numéro de fabrication : _____

Coussin d'application SANZA

Numéro de fabrication : _____

Bâton d'application SANZA

Numéro de fabrication : _____

Applicateur Helmholtz SANZA

Numéro de fabrication : _____

Bio-contrôleur

Numéro de fabrication : _____

Électrodes Zapper

Numéro de fabrication : _____

Assistance médicale directe par fax avec les formulaires prévus à cet égard par le biais de la centrale Santerra !